


BRUKSANVISNING

DROP NOT tilläggsutrustning för armbågsstöd

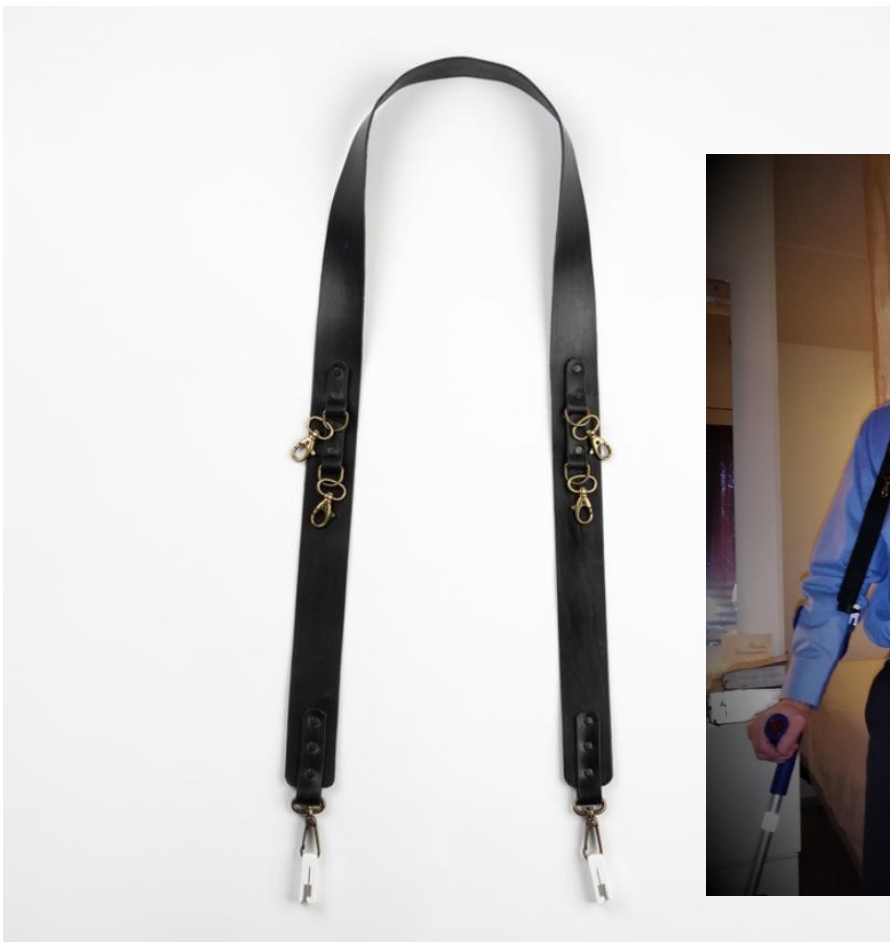

Klass I medicinsk utrustning

VIKTIGT:

Innan tilläggsutrustningen tas i bruk, läs denna bruksanvisning noggrant samt förvara bruksanvisningen för eventuellt kommande behov. I oklara fall vid ibruktagande gällande instruktioner och varningar, kontakta försäljare, fysioterapeut eller annan behörig fackman. Dessa kan informera om hur utrustningen användes säkert vid gång i trappor, vid sittande respektive uppstigande från stol eller användning i andra situationer.

1. FÖRKLARING TILL MÄRKNING SOM ANVÄNDES I BRUKSANVISNINGEN.

	Tillverkaruppgifter		Viktigt, observera detta i användning
	Bruksanvisning, läs noggrant		CE märkt utrustning

2. BRUKSÄNDAMÅL


! **DROP NOT tilläggsutrustning är avsett endast för bruk överensstämmande med i denna instruktion klargjord, övrig användning förbjuden!**



Läs denna instruktion noggrant innan tilläggsutrustningen användes!

Bruksändamål: Tilläggsutrustning för armbågs kryckor, som förhindrar att kryckorna faller ner då dessa inte används för att röra sig, dessa hålls lätt tillgängliga.

Lämplighet: Lämpas att användas med en eller två armbågs kryckor.

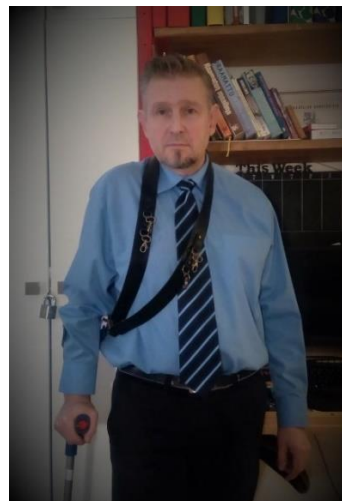

Rekommenderas för bruk endast över 14 års ålder.

Produkten lämpar sig att användas såväl inom- som utomhus.

Armbågskryckorna skall i personbil eller annat transportmedel placeras i sådant utrymme att dessa inte orsakar fara för sin användare eller övriga passagerare vid en eventuell kollision!


Lösgör armbågskryckorna från DROP NOT tilläggsutrustningen!

! **Notera! Även att armbågskryckornas placering i t.ex. personbil inte hindrar Airbagens funktion!**

! **Följ även de allmänna instruktioner som tillverkaren av armbågskryckorna har utgett för bruk av dessa.**


3. ANVÄNDNING

Fäst DROP NOT tillsatsen till armbågskryckorna medelst medföljande fästningsdetaljer av plast. (Gröna delar i bilden)

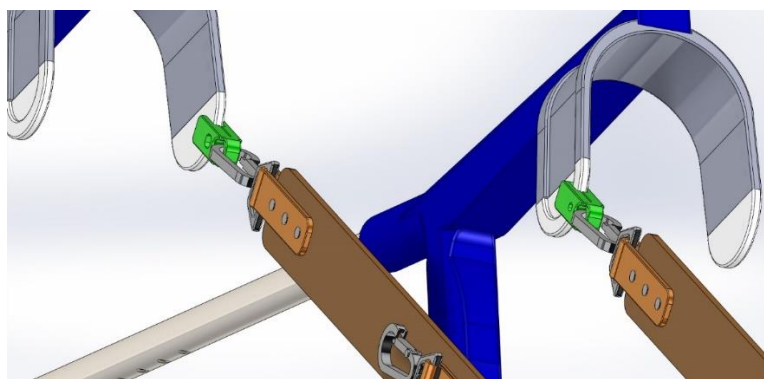

DROP NOT fästs till insidan av armbågskryckornas stöd, så att remmen förblir på händernas insida! Såvida förblir händerna fria, då du behöver dessa för något annat ändamål än för att röra sig.

Observera att fästets "tass" hamnar på samma sida som kantvårtan i kryckans armstöd.

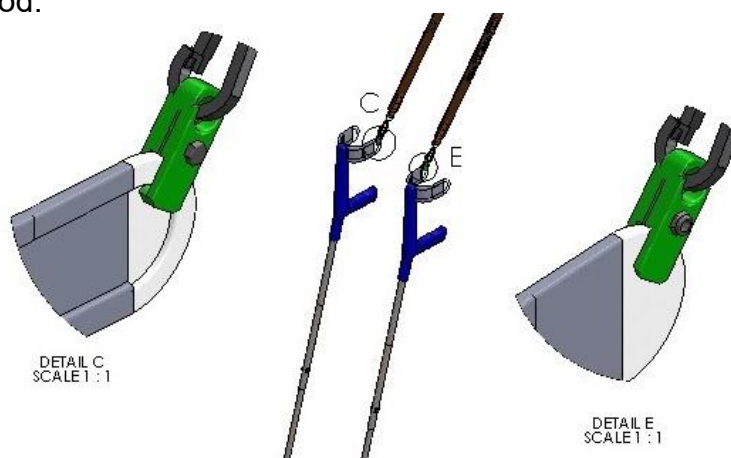

!



Fäst och dra åt M4 fästskruven efter att du har satt dit fästningsdelen i armbågsstyckans stödkant. M4 muttern på insidan där det finns ett urtag för muttern.

Med fästningsdelen medföljer M4x16 mm fästskruv och M4 mutter, dra åt skruven du har placerat fästningsdelen på önskad plats! Densamma har till uppgift att kvarhålla infästningstassen på sin plats, så att denna inte av misstag kan lossa. Dra ej åt för mycket!

Före användning, säkerställ dig om att fästningsdelen är ordentligt fästad till armbågsstycket samt att fästningsdelen är oskadad. Byt vid behov ut infästningsdelen.

Ifall du observerar felaktighet i DROP NOT tillsatsen eller dess fästningsdel, **använd ej utrustningen!**

Möjlig risk för skada Ta kontakt med försäljaren eller leverantören.

Metallkrokarna i remmen är avsedda, om vid behov så önskas, medtagning av (t.ex. Nycklar, handskar, plånbok etc)

Fästningsdelen fungerar även som en viktig del i utrustningens säkerhet, den ger vika och lossnar då den utsätts för större krafter än vad som är normalt.

T.ex. Vid möjligt snubblande eller fall omkull, förhindrar lossning av fästningsdelen en eventuell strypning orsakad av remmen.

4. SERVICE OCH RENGÖRING

Remmen består av växtbarkat läder. Den kan rengöras med en fuktig (vatten) trasa. Läderprodukter bibehåller sin kvalitet, då dessa kontinuerligt underhålls med läderunderhållsprodukter. Använd ej något lösningsmedel eller kemikalier vid en rengöring.

Ifall remmen blir våt, låt den torka sig själv, man får ej använda värmefläkt el.dyl. Läder hårdnar vid uppvärmning och kan börja spricka.

Gör inga ändringar eller tillägg till DROP NOT tillsatsen på eget initiativ!

